

Te felicitamos por la decisión de mejorar tu sonrisa, te encuentras en camino a un maravilloso resultado.

Por favor sigue las sugerencias de este folleto para asegurar un tratamiento exitoso y para cuidar adecuadamente tu alineador Invisaray.

Utilización de tu alineador Invisaray

Te sugerimos utilizar tu alineador todo el tiempo excepto cuando comas o cepilles tus dientes. Te tomara entre una y dos semanas sentirte a gusto con el aparato. Puedes tener pequeñas dificultades al hablar o una mayor salivación durante este periodo.

Mientras más utilices el aparato, durante el día, más corto será el tiempo de tratamiento.

Si el utilizar el aparato durante las horas laborables no es una buena opción, entonces opta por usarlo desde que llegues a casa y durante la noche. Siempre tienes la opción de no utilizar el aparato en ocasiones importantes, sociales o de negocios. Es por esto que el alineador Invisaray fue diseñado para ser removible y no fijo como los brackets tradicionales.

Evita lo siguiente:

- 1 Nunca expongas el alineador al calor; el calor distorsiona el aparato y no embonará correctamente.
- 2 Nunca hiervas o esterilices el alineador Invisaray
- 3 Nunca dejes el alineador dentro del auto durante el verano.
- 4 Nunca lo envuelvas en servilletas o pañuelos desechables. Te arriesgas a perderlo o que te lo tiren porque no se darán cuenta de que lo dejaste en la servilleta.



Limpiando tu alineador Invisaray

Tu alineador Invisaray fue elaborado individualmente a mano especialmente para ti .Es un aparato complejo y muy innovador que utiliza acetatos transparentes, (dependiendo del diseño) para generar fuerzas ortodóncias correctivas.

Es muy importante el conservar limpio el aparato para que funcione correctamente.

La mejor forma de limpiar el aparato es utilizando un limpiador ultrasónico y una solución de limpieza como las pastillas Corega Tabs.

Puedes usar también el chorro de agua y un cepillo dental sin pasta dental y remojar el cepillo en enjuague bucal.

Tips importantes.

- 1 Cuando no lo retengas en tu boca, almacena el alineador Invisaray en su recipiente .
- 2 Mantén limpio el alineador diariamente .
- 3 Utiliza el alineador según las instrucciones.
- 4 Siempre usa los dedos para introducir en tu boca el alineador en su lugar , nunca uses tus dientes para morderlo y llevarlo a su lugar, El usar tus dientes provocara una distorsión o ruptura del alineador.
- 5 Si llega a pasar algo con el alineador, por favor avisa de inmediato, para fabricar otro alineador rápidamente, para que repongas el perdido o dañado, esto tiene un costo, pero es mucho menor al de realizar todo el tratamiento

Contactanos en ortoray@gmail.com



Invisaray alineador

Instucciones y cuidados

www.ortoray.synthasite.com